

EmPower™ Foam

Enzyme xịt tạo bọt

Là sản phẩm có hoạt tính enzyme kép, dạng xịt bọt, không cần phải pha loãng, sẵn sàng để sử dụng

Công thức pH trung tính cung cấp bảo vệ chống ăn mòn tiên tiến và an toàn cho cao su, nhựa, thép không gỉ, thép carbon và kim loại mềm.

THÀNH PHẦN: Polyethylene glycol mono (nonyl phenyl) ether: 1- 5%. Nước và các thành phần không gây hại khác : 85-95%

TÁC DỤNG: Dùng để làm sạch trước bằng cách loại bỏ máu, mô, chất nhầy và dịch cơ thể khác giàu protein từ các dụng cụ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Để có kết quả tốt nhất, hãy phun EmPower™ Foam lên dụng cụ/ thiết bị ngay sau khi sử dụng. Không cần pha loãng.

1. Giữ bình xịt có khoảng cách từ 15-20 cm đến dụng cụ/thiết bị bắn. Xịt đều bọt và trực tiếp lên dụng cụ/thiết bị để đảm bảo các vết bắn được phủ hoàn toàn.
2. Cho phép dụng cụ/thiết bị ngâm trong **EmPower Foam**. Áp dụng lại khi cần thiết để giữ dụng cụ ẩm
3. Rửa sạch dụng cụ / thiết bị trước khi tiếp tục xử lý

THẬN TRỌNG

Đồ bảo hộ mắt, găng tay và quần áo **PHẢI ĐƯỢC TRANG BỊ**, đặc biệt là nơi tiếp xúc với máu và dịch cơ thể. Nếu vô tình chạm vào mắt bởi EmPower Foam hãy để mắt xả dưới vòi nước ngay lập tức trong 15 phút và tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Mắt có thể bị đỏ tạm thời.

BẢO QUẢN VÀ VỨT BỎ:

Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ phòng

Đổ bỏ dung dịch: Xả kỹ với lượng lớn nước vào hệ thống xử lý nước thải theo quy định của bệnh viện.

Vứt bỏ vỏ hộp: Không dùng lại vỏ hộp trống. Tái chế khi có sẵn, nếu không bỏ vào thùng rác

Lưu ý: EmPower Foam không phải là chất tiệt khuẩn/khử trùng

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS

Số đăng ký: 180002293/PCBA-HN

Số lô SX, Hạn dùng: Xem trên bao bì

Hạn dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Sản xuất tại: Mỹ

Nhà nhập khẩu:



Công ty CP Khoa học công nghệ Thái Sơn

Liên hệ TT 5.1A-12 KĐTMT Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại: **024 33 88 00 99**