

Serim®

# DISINTEK™ OPA TEST STRIPS

Dùng cho Chất khử khuẩn mức độ cao CIDEX® OPA hoặc MetriCide® OPA Plus™

Mã sản phẩm: 5121

Tên sản phẩm: DISINTEK OPA TEST STRIPS

Quy cách đóng gói: 2 Lọ/hộp; 50 que/Lọ

## Hướng dẫn sử dụng cho CIDEX® OPA:

1. Nhúng toàn bộ phần chỉ thị của que thử vào dung dịch Cidex OPA trong 20 giây
2. Nhấc que thử lên, chạm nhẹ cạnh dài của mép que lên khăn giấy để loại bỏ dung dịch OPA dư thừa
3. Đặt que thử với phần chỉ thị hướng lên nằm trên khăn giấy.
4. **Chờ thêm 40 giây** (sau khi đã ngâm 20 giây trong CIDEX OPA), sau đó giải thích kết quả bằng cách so sánh màu của phần chỉ thị với khối màu trên nhãn lọ.


## Hướng dẫn sử dụng cho MetriCide® OPA PLUS™:

1. Nhúng toàn bộ phần chỉ thị của que thử vào dung dịch **MetriCide OPA PLUS** trong đúng 5 giây.
2. Nhấc que thử lên, chạm nhẹ cạnh dài của mép que lên khăn giấy để loại bỏ dung dịch OPA dư thừa
3. Đặt que thử với phần chỉ thị hướng lên nằm trên khăn giấy.
4. **Chờ thêm 55 giây** (sau khi đã ngâm 5 giây trong MetriCide OPA Plus) sau đó giải thích kết quả bằng cách so sánh màu của phần chỉ thị với khối màu trên nhãn lọ.

## GIẢI THÍCH KẾT QUẢ

**PASS** – màu của phần chỉ thị tương tự hoặc xanh hơn khối màu PASS

**FAIL** – màu của phần chỉ thị cho màu xanh lam

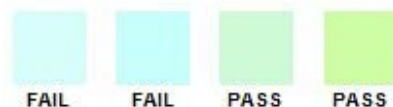

Sơ đồ chỉ mang tính chất minh họa. Luôn sử dụng các khối màu trên nhãn lọ thực tế để đối chiếu kết quả

CIDEX OPA là nhãn hiệu đã đăng ký của Sản phẩm Khử khuẩn mức độ cao, một công ty của Johnson & Johnson.

MetriCide OPA Plus là nhãn hiệu đã đăng ký của Metrex Research Corporation, một công ty con gián tiếp của Sybron Dental Specialties, Inc.

## Your Independent Choice for HLD Test Strips

Toll Free: 1.800.542.4670  
Phone: 1.574.264.3440  
Fax: 1.574.266.6222  
Website: www.serim.com  
E-mail: customerservice@serim.com

Serim®  
RESEARCH CORP

THAI SON  
SCIENTIFIC TECHNOLOGY

Nhà nhập khẩu:  
Công ty cổ phần khoa học Công nghệ Thái Sơn  
Liên hệ TT5.1A-12 KĐT M Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội  
Tel: 024 3388 0099