




1
Tập trung các dụng cụ bị han gỉ để làm sạch.



2
Tiến hành pha dung dịch Metrishine với tỉ lệ 100 ml dung dịch đậm đặc với 700ml nước.



3
Đặt dụng cụ vào trong thùng dung dịch Metrishine đã được pha sẵn, ngâm trong vòng 15 phút (30 phút đối với các dụng cụ bị đốm nặng). Chà dụng cụ bằng bàn chải lông cứng.

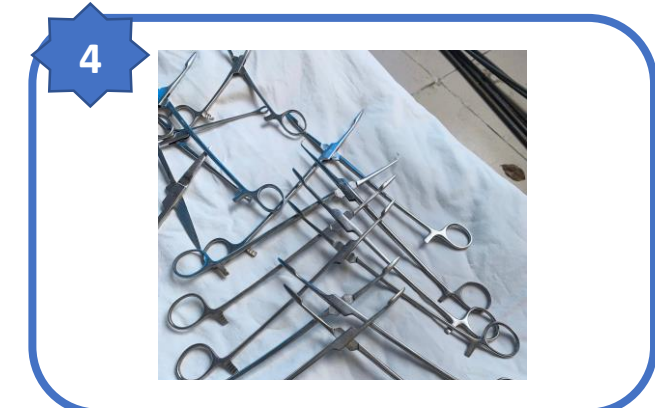

4
Vớt dụng cụ ra khỏi dung dịch MetriShine vừa ngâm sau đó rửa kỹ với nước sạch rồi làm khô.



5
Tiệt trùng hoặc khử khuẩn dụng cụ theo quy định của bệnh viện.



6
Giữ chai xịt Metrilube khoảng cách từ 15-20cm đến dụng cụ. Xịt phủ kín bề mặt dụng cụ (xịt kỹ các khớp nối) sau đó lau khô bằng khăn sạch hoặc khăn giấy.




7
Lắc chai xịt Metrilube Spray trước khi sử dụng, đặt các dụng cụ vừa được làm sạch vào khay hoặc bồn rửa



8
Lấy dụng cụ ra để ráo nước sau đó hấp.



9
Ngâm trong dụng cụ trong dung dịch MetriLube 35 – 40 giây. Vớt dụng cụ lau ra khỏi dung dịch MetriLube, khô bằng khăn sạch hoặc khăn giấy.

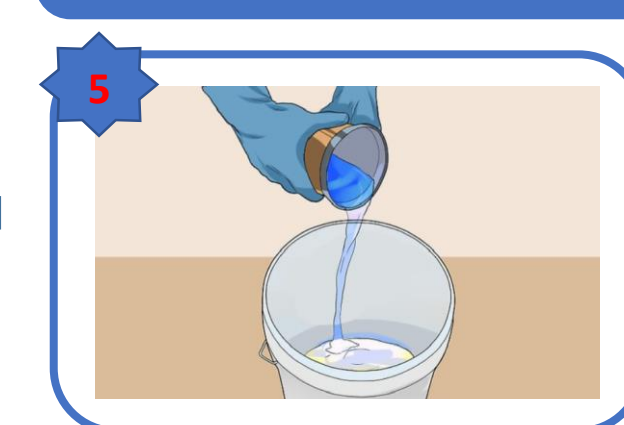

10
Tiến hành pha dung dịch MetriLube với tỉ lệ 100 ml dung dịch đậm đặc với 1500 ml nước.

