







HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

Các sản phẩm hãng Serim- Mỹ trong chạy thận nhân tạo

Mã Code	Sản phẩm	Hướng dẫn sử dụng nhanh
5167	Que thử hàm lượng Clo HiSENSE Ultra 0.1 Test Strips 	Quy trình định tính cho nước rửa (Clo tồn dư): Giữ phần chỉ thị của que thử trong dòng nước rửa 05 giây. Xuất hiện bất cứ màu hồng/tím/xám sẽ chỉ ra nồng độ ở mức 0,5ppm hoặc hơn. Quy trình bán định lượng Clo tổng số (Clo tự do và Cloramine) trong nước cấp hoặc nước rửa <ol style="list-style-type: none">Đổ đầy mẫu nước cần kiểm tra vào cốc mẫu, đổ đi và lại đổ đầy cốc mẫu với ~20ml nước khác.Bắt đầu đếm thời gian và nhúng phần chỉ thị vào mẫu nước. Lắc mạnh trước sau theo hướng vuông góc với que thử trong vòng 30 giây.Nhấc que thử ra và vẩy cho hết nước thừa. Ngay lập tức so sánh phần chỉ thị với các ô màu trên nhãn lọ.Ghi lại kết quả và vứt bỏ que thử đúng nơi quy định.
5129	Que thử độ cứng Water Hardness Test Strips 	Phương pháp nhúng <ol style="list-style-type: none">Lấy mẫu nước bằng một bình chứa sạchNhúng phần chỉ thị của que thử vào mẫu nước trong 01 giâySo sánh màu sắc của phần chỉ thị với các ô màu trên nhãn lọ 10 giây sau khi nhúng
5105	Que thử tồn dư Peroxide Residual Peroxide 	Cho kết quả định tính <ol style="list-style-type: none">Nhúng que thử vào dung dịch rửa trong 02 giây và vẩy mẫu dư thừaNếu không có màu xuất hiện ngay lúc đó nồng độ hydrogen peroxide là dưới 1 ppm Cho kết quả bán định lượng <ol style="list-style-type: none">Nhúng que thử vào dung dịch rửa trong 02 giây và vẩy mẫu dư thừaSo sánh que thử với các ô màu trên nhãn lọ 15 giây sau khi nhấc que thử ra khỏi mẫu dung dịch. Màu vàng rậm nắng/màu nâu có thể xuất hiện ở nồng độ trên 20 ppm.
5106	Que thử hiệu năng Peracetic Acid Peracetic Acid Potency Test Strips 	<ol style="list-style-type: none">Trước khi rửa quả lọc, cẩn thận thu mẫu đủ tại cổng nắp thẩm tách để cho phần chỉ thị được nhúng hoàn toàn (không được làm loãng mẫu)Nhúng phần chỉ thị vào trong mẫu trong 01 giây. Lập tức vẩy dung dịch dư thừa khỏi que thửQuan sát phần chỉ thị chính xác 10 giây sau khi nhúngLoại bỏ mẫu và nắp lại cổng thẩm tách. Kết quả: ĐẠT: Nếu phần chỉ thị chủ yếu hoặc hoàn toàn màu xám / xanh, đen hoặc nâu. KHÔNG ĐẠT: Nếu phần chỉ thị chủ yếu hoặc trắng hoàn toàn Lưu ý: Bỏ qua thay đổi màu sắc xảy ra sau 10 giây