

QUY TRÌNH VỆ SINH KHỬ KHUẨN GHẾ MÁY NHA KHOA^{1,2}



Sau mỗi lần điều trị, máy, ghế nha khoa cần được xử lý vệ sinh, khử khuẩn qua các bước sau:

Bước 1: Vệ sinh tay, sau đó mang trang phục phòng hộ (Khẩu trang, găng tay).

Bước 2: Xả bồn nhỏ nước bọt

Bước 3: Vệ sinh khử khuẩn bề mặt ghế nha khoa (sử dụng giấy lau khử khuẩn) theo trình tự:

- **Khăn 1:** Đèn nha khoa, bàn dụng cụ, bàn điều khiển, tay vịn hơi, dây tay khoan.
- **Khăn 2:** Tựa đầu, tựa lưng, tay vịn ghế.
- **Khăn 3:** Đầu gắn ống hút nước bọt, hút hơi, tay xịt hơi, bồn nhỏ nước bọt.
- **Khăn 4:** Khử khuẩn bổ sung trong trường hợp thủ thuật vắng bắn nhiều máu, dịch tiết

Bước 4: Tháo bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân, vệ sinh tay.

Bước 5: Chỉnh nâng ghế điều trị lên cao (thực hiện vào cuối ngày điều trị).

1. Quyết định 5991/QĐ-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2019, Phụ lục 12, QUY TRÌNH XỬ LÝ, VỆ SINH MÁY, GHẾ NHA KHOA, Tr.33
2. Hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành nha khoa, NXB. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tr.32